

亜鉛測定用

Zn標準液

使用目的

亜鉛（Zn）測定 of 検量用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

表示濃度

Zn濃度 : 200 μ g / dL

注意事項

- 1) 亜鉛（Zn）は水道水、空気中のほこりなどに多量に存在しているため、使用時には注意してください。
- 2) 蒸発や濃縮等、取り扱いに十分注意してください。
- 3) 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。

包装形態

製品コード	内容	包装
A250-00	Zn標準液	5ml \times 3

貯法, 有効期間

貯法 : 2 ~ 10 $^{\circ}$ C

有効期間 : 製造後1年 (有効期限はラベルに記載)



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

フリーダイヤル 0120-123-489