

ビリルビン測定用

B I L 標準物質

使用目的

総ビリルビン（T-B I L）または直接ビリルビン（D-B I L）測定の検量用

使用法

- 1) 内容物が飛散しないように注意してバイアルのゴム栓をはずし、常温（15～25℃）の精製水 1 m l を正確にホールピペット等で加えて再度ゴム栓を閉めます。
- 2) 室温に10～15分間放置後、緩やかに転倒混和し、内容物を完全に溶解します。
- 3) 溶解後は2～10℃保存し、当日中に使用してください。
- 4) 保存時は遮光して下さい。

表示濃度

ロットにより異なります。瓶ラベルの表示を確認してください。

注意事項

- 1) 光による影響に注意し遮光して保存してください。
- 2) 蒸発や濃縮等、取り扱いに十分注意してください。
- 3) 本品使用の原料中ではHB_s抗原、H I V抗体、H C V抗体は、E I A法にて陰性であることを確認してあります。しかし、ヒト血清に由来する製剤に感染性が全くないことを証明する方法はまだ確立されていませんので、患者血清と同様に注意して取り扱ってください。

包装形態

製品コード	内 容	包 装
A249-00	B I L 標準物質	1 m l 用×6

貯法、有効期間

貯法：2～10℃

有効期間：製造後1ヵ年（有効期限はラベルに記載）



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 050-3153-7493