

血清鉄・不飽和鉄結合能測定用

Fe 標準液

使用目的

血清鉄 (Fe) または不飽和鉄結合能 (UIBC) 測定 of 検量用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

表示濃度

Fe 濃度 : 200 μ g / dL

注意事項

- 1) 鉄 (Fe) は水道水、空気中のほこりなどに多量に存在しているため、使用時には注意してください。
- 2) 蒸発や濃縮等、取り扱いに十分注意してください。
- 3) 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。
- 4) 不飽和鉄結合能 (UIBC) の検量用として使用する場合は、マイナス (-) のファクターを入力してご使用ください。

包装形態

製品コード	内容	包装
A245-00	Fe 標準液	5ml \times 3

貯法, 有効期間

貯法 : 2 ~ 10 $^{\circ}$ C

有効期間 : 製造後 1 年 (有効期限はラベルに記載)



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143