

マグネシウム測定用

# Mg 標準液

## 使用目的

マグネシウム測定 of 検量用

## 使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

## 表示濃度

Mg : 5 mg / d L

## 注意事項

- 1) 濃縮等の取り扱いに十分注意してください。
- 2) 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。

## 包装形態

製品コード	包装
A223-00	5 ml × 6

## 貯法, 有効期間

貯法 : 2 ~ 10°C

有効期間 : 製造後 2 年 (有効期限はラベルに記載)



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西 1 条 8 丁目 8 - 7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143