

アンモニア測定用

NH₃標準液

使用目的

アンモニア測定 of 検量用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

表示濃度

アンモニア窒素：200 μ g / dL

注意事項

- 1) アンモニアは揮発性物質であり、容易に空気中などから混入しますので、取扱いには注意してください。また、濃縮等にも十分注意してください。
- 2) 使用するサンプルカップのアンモニア汚染に注意してください。

包装形態

製品コード	包装
A225-00	5 ml \times 6

貯法, 有効期間

貯法：2～10℃

*有効期間：製造後2年（有効期限はラベルに記載）



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143