

キャリブーU

■特 長

- 1) 複数項目の標準液を1液として使い勝手を良くしました。
- 2) 水溶性の尿用マルチキャリブレータです。
- 3) 使いやすい点眼瓶を使用しています。

■使用方法・安定性

- 1) 点眼ビンのキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けしてご使用下さい。
- 2) 保存時はしっかりと栓をして下さい。

■表示濃度

UN:300mg/dL, CRE:100mg/dL,

Ca:20mg/dL, IP:50mg/dL, GLU:1000mg/dL

■使用上の注意

- 1) 開栓後はコンタミや乾燥, 濃縮に注意して下さい。
- 2) 本品は酸性溶液ですので取り扱いに注意して下さい。
- 3) 本品にはアジ化ナトリウムは含まれておりません。

■包装・貯法・有効期間

製品コード	製品内容	包装形態	貯 法	有効期間
A211-01	キャリブーU	5ml x 6	2~10℃	2カ年



株式会社 セロテック

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

お問い合わせ先 企画開発室 E-mail kikaku@serotec.co.jp