

U-ALB標準液 TypeS

使用目的

微量アルブミンの多点検量測定用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

注意事項

1. 本品中のHBs抗原，HIV抗体はEIA法にて陰性であることを確認してあります。
しかし、ヒト血清に由来する製剤に感染性が全くないことを証明するための方法はまだ確立されていませんので、患者血清と同様に注意して取り扱ってください。
2. 基準とする標準品により表示値が異なりますので、よく確認してからご使用ください。
3. キャリブレーションセッティングが5点までしか対応していない機種に関しては、6点目を省略して使用してください。

包装形態

製品コード	包装
A246-60	3ml×6点セット

貯法，有効期間

貯法：2～10℃ 有効期間：製造後24ヵ月（有効期限はラベルに記載）

〔表示値〕

製品コード	製品内容	表示値①(HSA基準)	表示値②(ERM-DA470k基準)
A246-61	U-ALB標準液 1S	ALB濃度 14.8 mg/L	ALB濃度 20 mg/L
A246-62	U-ALB標準液 2S	ALB濃度 29.7 mg/L	ALB濃度 40 mg/L
A246-63	U-ALB標準液 3S	ALB濃度 74.2 mg/L	ALB濃度 100 mg/L
A246-64	U-ALB標準液 4S	ALB濃度 222.6 mg/L	ALB濃度 300 mg/L
A246-65	U-ALB標準液 5S	ALB濃度 593.5 mg/L	ALB濃度 800 mg/L
A246-66	U-ALB標準液 6S	ALB濃度 816.0 mg/L	ALB濃度 1100 mg/L

※従来からのヒト血清アルブミン(HSA)を基準とする場合は表示値①を、血漿蛋白国際標準品 IRMM ERM-DA470k を基準とする場合は表示値②をご使用ください。