

尿・髄液総蛋白測定用

「セロテック」 U T P 標準液

◆はじめに

「セロテック」U T P 標準液は液状品で、容器への蛋白吸着を抑えた尿・髄液中総蛋白測定のカリブレーターです。

◆特 長

本品の総蛋白(TP)はNIST SRM 927dに基づき正確さを伝達しています。

◆表示値と対照標準物質

項 目	表示値	対照標準物質
m-T P (ピロガロールレッド法)	1 0 0 mg/dL	NIST SRM 927d

◆適応する測定試薬

項 目	製 品 名
m-T P	「セロテック」U T P - L

◆使用方法

- 1) 泡立でないようにゆるやかに転倒混和したのち、点眼ビンのキャップを開けサンプルカップ等に分注してご使用下さい。
- 2) 開封後はコンタミネーションや乾燥、濃縮に注意してください。

◆安 定 性

本品は、2～10℃保存で、製造後1年間安定です。

◆貯法および有効期間

貯法：2～10℃保存 有効期間：製造後1ヵ年（有効期限はラベルに記載）

◆包装形態


製品コード	製 品 内 容	包 装
A243-00	「セロテック」U T P 標準液	2 ml × 6

◆使用上の注意

- 1) 測定試薬のロットが変わる場合や、測定装置のメンテナンス後には、必ず再検量を行って下さい。
- 2) 本品の適応が確認されているのは指定のセロテック製品のみです。その他の製品に使用された場合の測定値は確認しておりません。
- 3) 本品を開封後に保存する場合には、密栓して2～10℃に保存することとし開放状態あるいは常温のまま放置しないようにして下さい。また凍結保管しないで下さい。
- 4) 本品は、アジ化ナトリウムを含有しておりません。

◆文献請求先

株式会社セロテック 千歳工場 企画開発室
〒066-0051 千歳市泉沢1007-67
TEL 0123-28-2121 FAX 0123-28-2113

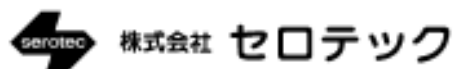

千歳市泉沢1007-67
TEL 0123-28-2121 FAX 0123-28-2113