

ケトン管理液L

使用目的

総ケトン体（「セロテック」ケトン-T）及び3-ヒドロキシ酪酸（「セロテック」3-HB）の精度管理用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用ください。
2. 保存時はしっかりと栓をしてください。

表示濃度

ケトン体（3-ヒドロキシ酪酸として）： $150\mu\text{mol/L}$

注意事項

- 1) 濃縮等の取り扱いに十分注意してください。
- 2) 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。
- 3) 本品中には0.1%以下のアジ化ナトリウムが添加されていますので皮膚や粘膜に直接触れないように注意して下さい。また、廃棄する際にはハロゲン化合物、重金属、酸との接触がないように安全のため大量の水で希釈して排水して下さい。
(毒物には該当しません。)


包装形態

製品コード	内容	包装
A224-50	ケトン管理液L ($150\mu\text{mol/L}$)	5ml × 3

貯法、有効期間

貯法：2～10℃

有効期間：製造後2年（有効期限はラベルに記載）

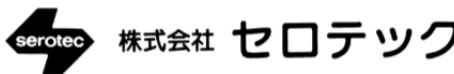

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143