

「セロテック」セロコンー5E

本品は、ヒト血清を原料とした液状凍結品で、生化学の精度管理に使用できるように各成分の濃度を調整しています。

製品概要

1. 精度管理に適するように、主に高値域の濃度に調整してあります。
2. 使用しやすいように、点眼瓶容器を使用しました。
3. ALP,AST,ALT,LD,γ-GT,CK,AMYは動物由来の酵素を添加して濃度を調整してあります。
(添加酵素由来 ALP:子ウシ腸、AST,ALT,CK:ブタ心臓、LD:ニワトリ心臓、γ-GT:ウシ腎臓、AMY:ブタ膵臓)
4. 保存剤としてアジ化ナトリウムは使用していませんので、PODやカタラーゼに対する阻害はありません。

参考分析値

各成分の参考分析値は次ページに記載しています。
なお、ロットにより参考分析値は異なります。

用法

1. 本品は流水中(室温以下)または室温で静置して完全に融解し、緩やかに転倒混和してから使用してください。
融解後、使用時以外は2～10℃の冷暗所に保存し、5日以内に使用してください。
なお、室温で保存される場合は6時間以内に使用してください。
2. 融解後は必ず密栓して保存し、汚染、濃縮、変性などを避けてください。
特にビリルビンは光の影響を受けますので外箱に入れる等、遮光して保存してください。

使用上又は取扱い上の注意

1. 使用説明書に記載した用法に従って使用してください。また、各成分を測定する際には、対応する測定用試薬の添付文書に従って測定操作を実施してください。
2. 本品(未融解品)の保存は、暗所で、-40℃以下の冷凍庫で保存してください。
3. 有効期限が過ぎた場合は使用しないでください。
4. 本品は、HBs抗原、HIV抗体、HTLV-I抗体及びHCV抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染の危険性があるものとして、患者検体と同様に十分注意して取り扱ってください。
5. 保存時には本品に室内照明以上の強い光が当たらないように注意してください。ビリルビンが低下する恐れがあります。
6. 本品が目や口に入った場合には水で十分に洗い流し、医師などに相談し、指示を受けてください。
7. 使用後の容器は廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等に区別して処理してください。

包装形態

製品コード CCS112-10 (統一商品コード: 531199105)
製品名 「セロテック」セロコンー5E
包装単位 5ml×10

貯法・有効期間

暗所 -40℃以下で保存。製造より2年間(有効期限はラベルに記載)

お問い合わせ先

株式会社セロテック 千歳工場 企画開発室 TEL 0123-28-2121

serotec